


# みまもり施設

- ・環境センシング
- ・健康モニター
- ・業務軽減

## 環境センサでみまもりをサポート

・環境センサ  
・ドアセンサ  
・WEBカメラ  
8項目を  
センシング。

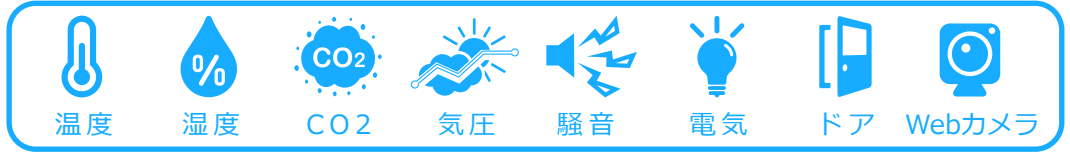

※しきい値は任意で変更可能です。

**温度**

20℃以下28℃以上を通知

**湿度**

40%以下70%以上を通知

**CO2**

3000ppm以上を通知

**気圧**

現在の気圧を表示

**電気**

300lx以上で通知  
消灯確認

**騒音**

90dB以上を通知

**ドア**  
※オプション 開発中

開閉を通知  
閉め忘れ防止


**Webカメラ**  
※オプション 開発中

みまもり確認  
任意で起動

・パソコン  
・タブレット  
・スマホ  
専用アプリ不要  
で表示対応。

- 表示機能**  
規定値を外れた数値を検出すると、色とマークが変わって表示されます。
- 通知機能**  
規定値を外れた数値を検出や変化などをライン等で通知します。
- メモ機能**  
連絡事項、イベント等のコメント記入。写真の貼付けができます。
- カメラ機能** ※オプション（開発中）  
Webカメラで離れた場所からお部屋のみまもりができます。

LINE ライン通知機能 (例)

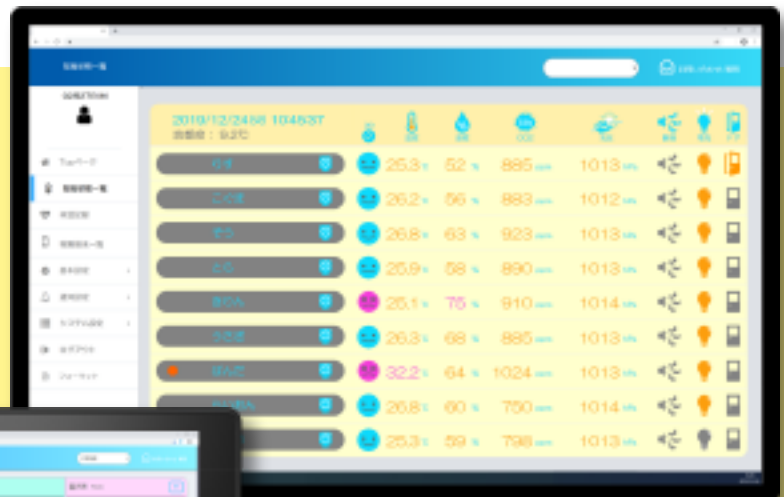

※ドアセンサ (オプション・開発中)

しきい値を超えると赤色で表示します。環境対策をサポート。



Webカメラ機能 (オプション・開発中)

### インフルエンザ対策

温湿度管理値

- ・室温 20 ~ 25℃
- ・湿度 50 ~ 70%
- ・40%を下回らない

湿度 40%以下で通知

加湿器を使用する等、環境管理の実施。

### コロナウィルス対策

換気管理値

換気基準としてCO2濃度を測定。しきい値を超えたら換気を行う

CO2 1000ppm以上で通知

換気を行い、環境管理の実施。

### 熱中症対策

暑さ指数値

- ・危険 31℃以上
- ・嚴重警戒 28 ~ 31℃
- ・警戒 25 ~ 28℃

温度 28℃以上で通知

エアコン等を使用して室温を下げる。

### 食中毒対策

食中毒警報値

- ・2日間の平均気温が27度以上
- ・平均相対湿度が75%以上

湿度 70%以上で通知

食品や調理器具の管理の実施。

# 健康管理をPCやタブレットで一括管理

非接触型  
スマート体温計。  
データベースで  
一括自動管理。  
業務軽減。

非接触体温計




アプリ



酸素濃度計




血圧計

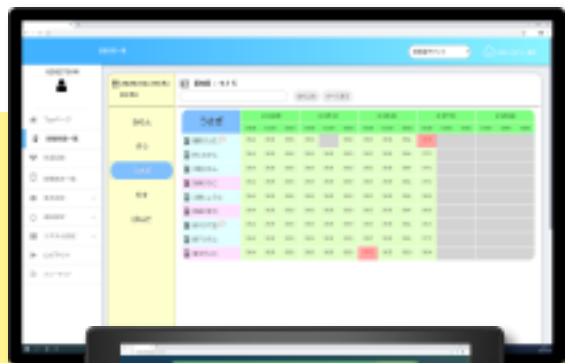

※表示の画面は開発中のものです。

## ・みまもりシステム概要

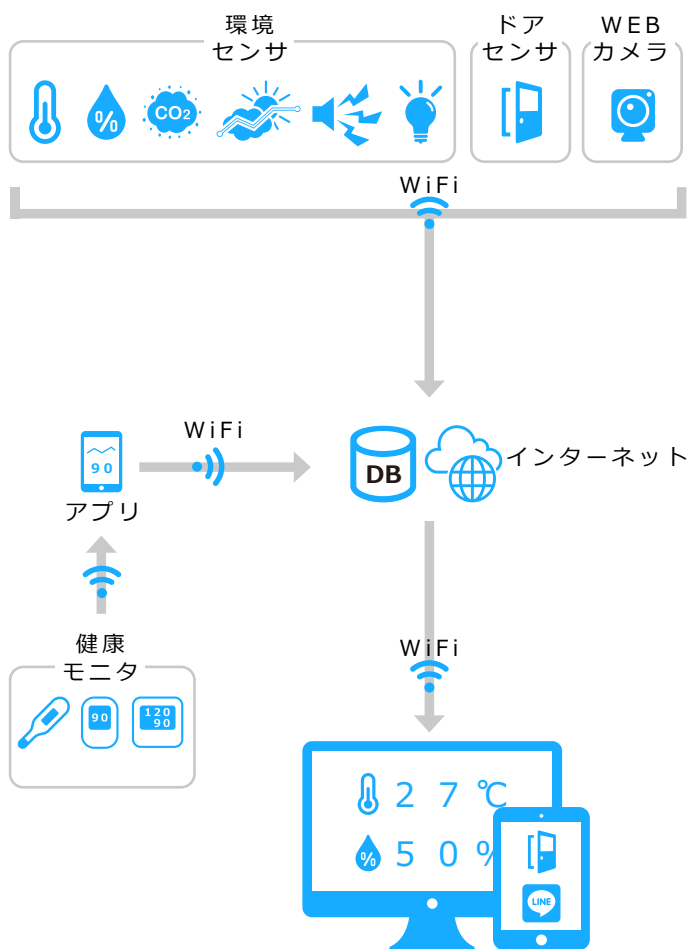

## 環境センサ仕様

定格

電源電圧	5V、100mA以下 (USB給電)
測定機能	温度、湿度、照度、気圧、騒音、CO2 (eTVOC)
通信方式	Bluetooth low energy (Bluetooth v5.0)

性能

	検出可能範囲	精度
温度	℃ -10 ~ 60	±2 以内
湿度	%RH 30 ~ 80	±5 以内
照度	lx 10 ~ 2000	±100 以内
気圧	hPa 700 ~ 1100	±4 以内
騒音	dB 40 ~ 94	参考出力
CO2 (eTVOC)	ppm 0 ~ 32767	参考出力
3軸加速度	gal -2000 ~ 2000	参考出力

## 体温計仕様

測定箇所	額
体温測定範囲	+34.0℃ ~ +42.5℃
測定精度	+36.0 ~ +39.0℃ において ±0.2℃ 以内 ※ それ以外は ±0.3℃ 以内
最小表示範囲	0.1℃

- ・電源：単4形アルカリ乾電池1本 / 電気定格：DC1.5V 0.09W
- ・新品電池を使用した場合の測定回数 約4000回
- ・本体寸法：縦34.4×横161.0×高さ25.2mm
- ・本体質量：約50g (付属品含まず)

## 酸素濃度計仕様

測定方法	2波長血液吸光度法
使用目的	動脈血の経皮的酸素飽和度及び脈拍数測定
測定部位	指先
測定可能指周囲長	約30 ~ 66mm (爪付け根部指周囲) 参考
測定範囲	血中酸素飽和度 (SpO2) : 0 ~ 100% 脈拍数 : 30 ~ 240拍 / 分

- ・電源：単4形アルカリ乾電池1本
- ・本体寸法：縦60×横34.8×高さ31.8mm
- ・本体質量：約37g (電池含まず)

## 血圧計仕様

測定方法	オシロメトリック法
表示	15桁液晶表示
圧力表示範囲	3 ~ 300mmHg (腕帯圧力)
測定範囲	50 ~ 250mmHg (最高血圧)
	40 ~ 180mmHg (最低血圧)
精度	40 ~ 160拍 / 分 (脈拍)
	±3mmHg (圧力) ±5% (脈拍)

- ・電源：専用ACアダプタ使用時  
アダプタ定格 AC100-240V 50/60Hz 0.12A  
本体定格 DC6V 500mA  
単3形アルカリ乾電池4本使用時  
DC6V / 4W
- ・本体寸法：約縦162.3×横127.3×高さ96mm
- ・本体質量：約331g (付属品を含まない)

製造販売元



〒141-0031  
東京都品川区西五反田2-12-19  
五反田NNビル8階  
TEL 03-6887-8008  
FAX 03-6887-8006